

Wiederbefüllbarer Spendersystem

- ✓ Kombination aus ventiwipes Eimern und Vliestüchern in Verbindung mit geeigneten Desinfektionsmittel
- ✓ ventiwipes Spendereimer sind spülmaschinenfest bis 90°C
- ✓ ventiwipes Vliestücher sind aus hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff

ventiwipes sind trockene Vliestücher zur Tränkung mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln und Anwenderlösungen von Desinfektionsmittelkonzentraten. ventiwipes ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Für die ventiwipes Vliestuchrollen wurde ein spezieller, verschließbarer Spenderimer konzipiert. Die Anwenderlösung ist durch dieses geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt.

Dadurch ist die Anwenderlösung 28 Tage* verwendbar

Anwendungsgebiete:

Wiederbefüllbares Spendersystem zur hygienischen Aufbewahrung von Vliestüchern in Kombination mit geeigneten Flächendesinfektionsmitteln zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Zum Arbeitsschutz sowie zum Schutz der Vliestücher vor Kontamination empfehlen wir das Tragen eines Schutzkittels sowie geeignete Handschuhe.

Anwendung bei der Wiederbefüllung:

1a. Reinigen (mechanisch) des Spendereimers unter Zuhilfenahme des letzten Tuches und Wasser. Dies soll Anhaftungen entfernen und das Aufbrechen von Biofilmen unterstützen. Besonders im Bereich der Entnahmeöffnung der Tücher und dem Verschlussdeckel.

Spendereimer vollständig abtrocknen lassen (30 Minuten).

1b. Alternativ können der Eimer und der Deckel in einer Geschirrspülmaschine (bis 90°C) gereinigt werden. Auch hier ist auf eine vollständige Abtrocknung zu achten.

2. Spendereimer mit desinfektionsmittelgetränkten Tüchern desinfizieren, besonders im Bereich des Deckels und der Entnahmeöffnung. Einwirkzeit abwarten, Spendereimer und Deckel vollständig abtrocknen lassen.

3. Trockene Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den Spendereimer stellen. Das mittlere Tuch etwas heraus ziehen. Gebrauchslösung über die Tücher geben. Das hervorstehende Tuch durch die Entnahmeöffnung führen, das erste Tuch werfen und den Deckel fest verschließen.

4. Mitgeliefertes Etikett beschriften und auf den Deckel kleben.

Bei der Befüllung mit trockenen Vliestüchern und Tränkflüssigkeit ist das Vliestuchspendersystem nach ca. 30 min einsatzbereit.

* Bei sichtbarer Verschmutzung oder möglicher Kontamination ist die Lösung sofort auszutauschen.

Gutachten und Zertifikate:

Gutachten zur desinfizierenden Wirksamkeit und Standzeitprüfung gemäß 4-Felder-Test in Kombination mit ventiwipes Vliestuchspendersystem

- ventides GF

- ventisept F

- ventisept forte NF

- ventisept liquid AF

Prof. Dr. med H.-P. Werner, Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, Schwerin.

Zulassung und Listungen:

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Stand der Information: 11/2017

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de