

Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- ✓ reinigungsstark, ideal für Linoleum und PVC
- ✓ mit angenehmem Geruch
- ✓ VAH- und DVG-gelistet

Ventisept forte NF ist ein begrenzt viruzid wirksames Konzentrat für die Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Es ist ebenfalls hervorragend geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen. ventisept forte NF verfügt über ein breites Wirkungsspektrum, ist wirksam gegen die meisten behüllten und unbehüllten Viren inkl. Noro-, Adeno-, Rota- sowie SV 40/Papovaviren. Es wirkt auf der Basis von quaternären Ammoniumverbindungen und enthält weder Aldehyde noch Phenole. ventisept forte NF enthält einen Korrosionsschutz und bietet eine gute Materialverträglichkeit. Aufgrund seines angenehmen Geruchs ist es besonders für Räume geeignet, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

Anwendung:

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Oberfläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten ventisept forte NF Gebrauchslösung vollständig benetzen und mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Desinfektion im Lebensmittelbereich: Im Lebensmittelbereich nach der Einwirkzeit mit ausreichend Trinkwasser gründlich nachspülen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen. Lebensmittelkontaktflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser geeigneter Qualität nachspülen.

Anwendungshinweise:

Vor erstmaliger Anwendung von ventisept forte NF ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt zu empfehlen.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Polyethylenterephthalat (PET), Polycarbonat (PC), Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS).

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 16g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid. Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzienverordnung): Enthält 15 - 30 % nichtionische Tenside 5 - 15 %, Desinfektionsmittel, Duftstoffe: Limonene.

Gefahr:

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-14-alkyldimethyl-, chloride; Alkylpropylendiämin-1,5-bis-guanidiniumacetat; Alkohole, C9-11, verzweigt, ethoxiliert; Tridecylamin. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion

(bakterizid, levurozid) gem. VAH/EN 16615

1,0% 5 Min.

0,75% 15 Min.

0,5% 60 Min.

Begrenzt viruzid gem. EN 14476

1,0% 15 Min.

Ergänzende Prüfergebnisse:

Wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476

1,0% 60 Min.

Wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476

2,0% 240 Min.

Wirksam gegen Rotaviren gem. RKI/DVV

0,25% 15 Min.

Wirksam gegen SV40/Papovaviren gem. RKI/DVV

1,0% 60 Min.

tuberkulozid (M.terrae)

0,5% 60 Min.

Einwirkzeiten gem. DVG: siehe DVG-Liste (www.dvg.net)

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-49701, N-49700

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

UFI: G8J0-W0GW-H00Q-S72R



Verfügbare Gebindegrößen

	REF	PZN	Stück / Karton	Stück / Palette
ventisept forte NF 1000ml Dosierflasche	204422	06921010	10 Flaschen	320 Flaschen
ventisept forte NF 5000ml Kanister	204423	06921020	3 Kanister	96 Kanister

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de