

Alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

VENTIDES GF WIPES

- ✓ für mittelgroße Oberflächen von Medizinprodukten
- ✓ schnelle, umfassende Wirksamkeit
- ✓ Geeignet zur Desinfektion von Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen

Inhalt: 100 Blatt (ca. 20 x 22 cm)

ventides GF wipes bieten bei der Desinfektion und Reinigung von mittelgroßen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Sie sind alkoholfrei und enthalten weder Aldehyde noch Phenole. Die Tücher lassen sich einzeln aus der praktischen Packung mit wiederverschließbarem Deckel entnehmen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Anwendungsgebiete:

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten, sowie Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen. Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Flächen mit ventides GF wipes bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung von ventides GF wipes wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC).

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

Besondere Hinweise:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 3 Monate.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH/EN 16615 1 Min.*

Begrenzt viruzid gem. EN 14476 1 Min.

Ergänzende Prüfergebnisse:

Wirksam gegen Rotaviren gem. RKI/DVV 30 Sek.

Wirksam gegen Papova-/SV40-Viren gemäß EN 14476 2 Min.

* gelistet in der 5-Minuten-Spalte der VAH-Liste

Zulassung und Listungen:

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-70161.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der Desinfektionsmittelliste der IHO (Gesundheitswesen).

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Verfügbare Gebindegrößen	REF	Stück / VE	Stück / Palette
100 Blatt im FlowPack	208T100	6 FlowPacks	270 FlowPacks



Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de