

Alkoholische Schnelldesinfektion

- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung
- ✓ geeignet für den Lebensmittelbereich
- ✓ umfassende Virenwirksamkeit inklusive Noro-Viren (MNV)

Ventisept Pur ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ventisept Pur trocknet aufgrund seiner parfüm- und farbstofffreien Eigenschaften rückstandsfrei ab und ist daher ideal für den Lebensmittelbereich geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung:

Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

Anwendung:

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Ventisept Pur kann als Wischdesinfektion oder mit einer Schaumspühapplikation verwendet werden. Einsatz im Vliestuchspendersystem: Ventisept Pur eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den ventiwipes.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH / EN 16615	5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	30 Sek.
Mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	1 Min.
Begrenzt viruzid inkl. Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV	30 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS	3 Min.
Wirksam gegen Rotaviren	30 Sek.
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	1 Min.
Wirksam gegen Adenoviren	3 Min.

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.

Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der baua unter der Reg.-Nr. N-77396

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.



**Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Nur zur professionellen Anwendung, kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!**

Verfügbare Gebindegrößen

REF

ventisept pur 1000ml

323010P

ventisept pur 5000ml

323050P

CE 0482

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de